

Patienteninformation

# ALIGNER-THERAPIE

Die moderne Behandlungsmethode zur ästhetischen Korrektur von Frontzähnen



## Vorteile

7 Aspekte, die für die Aligner-Therapie sprechen

- Individualität**  
Die Therapieplanung wird individuell auf den Patienten abgestimmt.
- Flexibilität**  
Der Aligner kann beim Zähneputzen oder Essen einfach herausgenommen werden. Somit entstehen keinerlei Einschränkungen.
- Hoher Komfort**  
Die Aligner-Schiene besteht aus einem angenehm glatten Kunststoffmaterial ohne störende Metalldrähte.
- Transparenz**  
Das Sprechen und Lachen wird durch den nahezu unsichtbaren Aligner nicht beeinträchtigt.
- Effektivität**  
Innerhalb weniger Wochen kann das gewünschte Ergebnis erzielt werden.
- Innovative Methode**  
Die moderne und präzise digitale 3D-Technologie gewährleistet eine hohe Passgenauigkeit.
- Schmerzfremde Therapie**  
Die Annäherung an ein optimales Ergebnis erfolgt Schritt für Schritt und ist daher eine sanfte und besonders schonende Methode.



## Aligner-Therapie




Die moderne Behandlungsmethode zur ästhetischen Frontzahnkorrektur

Mittels der Aligner-Therapie ist es möglich, Zahnfehlstellungen, Lücken und Engstände, bei erwachsenen Patienten, zu korrigieren.

Zur Behandlung werden transparente und individuell angepasste Kunststoffschienen genutzt. Diese bringen die Zähne, nach mehreren Behandlungsschritten, schonend in die gewünschte Position.

Nach Beendigung der Schientherapie empfehlen wir das Tragen eines Retainers.


Beispiel für einen Behandlungsschritt (1 Aligner-Set)

Stärke		Tragezeitraum
Soft		1. - 2. Woche
Medium		3. - 4. Woche
Hard		5. - 6. Woche

Ab dem zweiten Behandlungsschritt wiederholt sich das 3-Aligner-Prinzip.

# Behandlungsablauf

Der Weg zu einem neuen Patientenlächeln

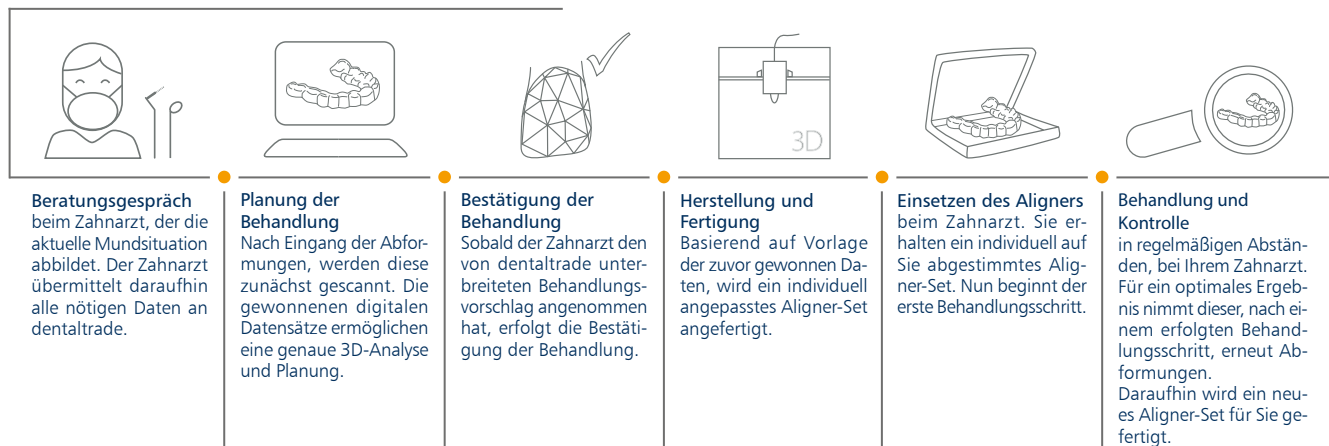

## Überblick


### Gesundheitsaspekt

Die Aligner-Therapie ermöglicht eine Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes, und die Behandlung wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus.


Eine optimierte Zahnstellung verhilft also nicht nur zu einem neuen Lächeln, sondern vermeidet auch Beschädigungen an den Zähnen.

Oftmals sind zu engstehende oder unbegradigte Zähne schwierig zu pflegen und begünstigen dadurch die Entstehung von Erkrankungen, wie Karies und Parodontitis.


### Mögliche Mundsituationen vor der Aligner-Therapie

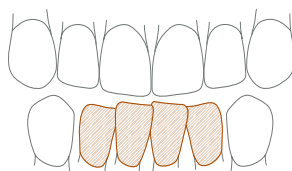


Zahnschiefstand

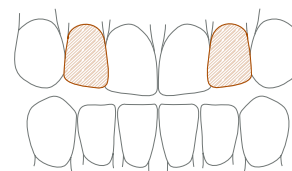

nach außen gekippte Zähne

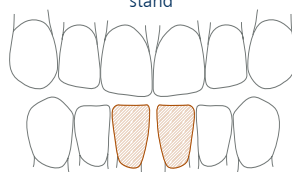

Zahnlücke

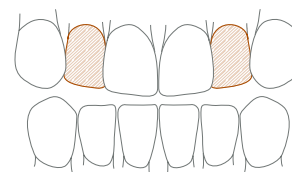

nach innen gekippte Zähne



Grazer Straße 8 · 28359 Bremen / Germany

freecall: (0800) 230 231-1 · Fax: +49 (0) 421 247 147-9

E-Mail: [patientenservice@dentaltrade.de](mailto:patientenservice@dentaltrade.de) · [www.dentaltrade.de](http://www.dentaltrade.de)